



Titel: Sondspruta		Dokumenttyp Vårdrutin	
Godkänt av:	Styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län /	Godkänt den:	2011-07-01
Kategori:	Vård/medicinska riktlinjer,		
Skapat av:	Sektionen för vårdhygien i Uppsala län	Skapat den:	2005-03-15
Granskad av:			
Reviderat av:	Sektionen för vårdhygien i Uppsala län	Reviderat den:	2011-07-01

Rengöringsrutin för flergångs sonsdspruta för enpatientsbruk

För att undvika bakteriekontamination av sondnäring krävs strikta hygienrutiner. Tillämpa basala hygienrutiner vid hantering av sond och tillförselsystem; sondaggregat, sonsdspruta och näringslösning.

Sonsdsprutan ska vara ren vid varje användning. I hushållsdiskmaskin blir plastsprutan inte tillräckligt rengjord. Sprutan får inte diskas för hand i tvättställ. Kassera sprutan då den blivit trög otät eller repig. Byt spruta minst en gång per månad.

Sonsdspruta för enpatientsbruk kan rengöras enligt två metoder.

Metod 1. Rengöring i diskdesinfektor

Ta isär sprutan.

Sätt sprutan på munstycket för genomspolning så att sprutan blir ren även inuti.

Låt delarna bli riktigt torra.

Förvara sprutan isärtagen i torr ren rondsål.

Metod 2. Rengöring för hand med diskmedel och vatten

Rengöringen ska ske i kök.

Ta isär sprutan och diska den med hjälp av ren diskborste och t ex mellanrumstandborste.

Skölj delarna noggrant under rinnande kallt vatten.

Låt delarna bli riktigt torra.

Förvara sprutan isärtagen i torr ren rondsål.